



## Handleiding blijfstoel

### **Bijlage 1.0 (veiligheidsinstructie: openen tablet v.20171212)**

3 pagina's

Doel: vermijden van lichamelijke letsels door verkeerd gebruik

Verplicht na te lezen door alle gebruikers

Affligemstraat 51b  
1742 Ternat

t. 053 66 00 49  
f. 053 66 00 46

post@yacura.be  
www.yacura.be



## Om veilig het tablet van de blijstoel te openen, lees aandachtig deze handleiding en volg stipt de procedure

Reden van deze veiligheidsinstructie: wie zijn hand blijvend op de voorwaardeknop laat rusten én tegelijkertijd op het pedaal duwt, ontgrendeld het tablet onveilig. Want als het kind het tablet vooruitschuift kan de hand van de verzorgende ernstig verwond raken.

		<p>Druk de voorwaardeknop in en <b>laat los</b>.</p>
		<p>De voorwaardeknop zal nu ingedrukt blijven. Het tablet is nog steeds vergrendeld.</p>
		<p>Ga bij het kind en pedaal staan en houd het kind in bedwang met één hand en neem met de andere hand het tablet vast in de grijpgleuf.</p>
		<p>Druk het pedaal in en hoor de klik!</p>

i



Terwijl u nog altijd het kind in bedwang houdt, schuif het tablet naar voor en los intussen het pedaal.

i



Schuif het tablet helemaal naar voor en kantel het.

i



Klik het tablet naar beneden tot u een klik hoort. Het tablet staat nu vast.

i



Het kind kan nu de stoel verlaten zonder hoeven te vrezen dat het tablet kan kantelen.

i

**Zorg ervoor dat alle medewerkers deze handleiding aandachtig doornemen om onaangename verrassingen te voorkomen!**

i

Tip: bekijk eveneens het instructiefilmpje:

YOUTUBE: <https://www.youtube.com/watch?v=Xji0t8Frn44>

OF

OP ONZE WEBSITE - LINKS: belangrijke veiligheidsinstructie voor gebruikers